

HANDLEIDING voor de Histamine test


Alvorens u aan de test begint, adviseren wij u om eerst aandachtig de gehele handleiding door te lezen. Indien u hierna nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw behandelend arts of therapeut.

Controleer eerst of alle benodigde materialen in de testkit aanwezig zijn. Uw testpakket hoort te bevatten:

- Handleiding voor de Histamine test
- Fe-Col (ontlasting opvanger)
- RigidSafetybag
- Doorzichtig buisje met vloeistof met gekleurde dop
- Laboratoriumaanvraagformulier RP Analytic (reeds ingevuld door u en uw behandelend arts of therapeut)
- Verzendenvelop (aan RP Analytic)

Afname van de Histamine test

1. Neem het buisje met de groen/blauwe dop. Draai de groene dop (met het kammetje) een kwartslag linksom en trek deze vervolgens uit de blauwe dop. **Let op: de vloeistof moet in het doorzichtige buisje blijven.**
2. Steek het kammetje van de groene dop in de ontlasting. **Let op: alle inkepingen van het kammetje moeten goed gevuld zijn.** Is dit niet direct het geval, herhaal stap 2 totdat alle kammetjes gevuld zijn.
3. Steek het kammetje door de opening van de blauwe dop. Druk de groene dop door totdat deze niet meer verder kan. Het gevulde kammetje moet in de vloeistof zitten.
4. Draai de groene dop een kwartslag rechtsom totdat de groene dop vastklemt in de blauwe dop. Het buisje is nu correct gesloten.
5. Vul de gegevens in op de sticker.
6. Stop het buisje in de RigidSafetybag en plak deze dicht. Doe dit samen met het aanvraagformulier in de witte verzendenvelop. **Let op: vergeet niet uw aanvraagformulier volledig in te vullen en mee te sturen in de verzendenvelop.**
7. Stuur de envelop kosteloos retour aan RP Analytic.

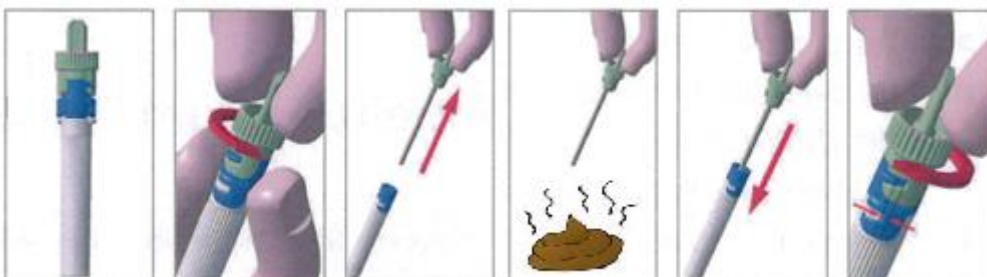

ANLEITUNG zum Histamintest

Wir empfehlen dringend erst die Gebrauchsanleitung aufmerksam zu lesen und erst danach den Test durchzuführen. Bei Fragen oder Unklarheiten fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Therapeuten.

Kontrollieren Sie bitte zuerst, ob alle benötigten Materialien vorhanden sind. Im Testpaket sollte enthalten sein:

- Instruktion zur Befüllung des Probengefäßes
- Kunststoff Schutzbeutel mit Selbstkleberand
- Durchsichtiges Röhrchen mit blau-grünem Verschluss zur Testabnahme
- Labor-Auftragsformular von RP Analytic (ausgefüllt durch Ihren Arzt oder Therapeuten)
- 1 Versandumschlag (an RP Analytic)

Test-Abnahme

1. Halten Sie das Gefäß am blauen Adapter fest, drehen Sie den grünen Stick gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie diesen aus dem durchsichtigen Röhrchen heraus.
2. Stechen Sie mit der Spitze des Sticks in drei verschiedene Stellen Ihrer Stuhlprobe. **Achtung: der Stick sollte nur bis zu den Einkerbungen befüllt sein.** Wenn zuviel Stuhl entnommen wird, führt das zu falsch-positiven Werten.
3. Stecken Sie den grünen Stick durch die Öffnung des blauen Adapters bis auf Anschlag und verschließen Sie ihn, bis er einrastet.
4. Das Probenröhrchen in den durchsichtige Kunststoffschutzbeutel einbringen, diesen mit dem Selbstkleberand verschließen und dann in die Versandtasche stecken. **Achtung: bitte das ausgefüllte Labor-Auftragsformular beifügen!**

